


## Lietošanas instrukcija siekalu ņemšanai laboratoriskajiem izmeklējumiem uz SARS-CoV-2

Šis siekalu ņemšanas komplekts ir piemērots lietošanai arī BEZ medicīniskā personāla klātbūtnes.

1. Nomazgājiet vai nodezinficējiet rokas
2. Atveriet parauga ņemšanas komplektu (ņemšanas stobriņš, atpakaļsūtīšanas maisiņš).
3. Pierakstiet uz ņemšanas stobriņa redzamo kodu, kas sākas ar burtu "S". Tas būs nepieciešams, lai piekļūtu rezultātam.
4. Siekalas jāsavāc ne ātrāk kā 30 minūtes pēc zobu tīrīšanas, ēšanas, dzeršanas vai perorālas zāļu lietošanas, lai izvairītos no interferējošām substancēm.  
Pirms siekalu vākšanas mute nav jāskalo.
5. Paņemiet komplektā esošo stobriņu, kurā ir iepildīts buferšķīdums – NaCl 0,9%. Tas ir nekaitīgs, saskaroties gan iešķīgi, gan ārīgi. Nelejiet to ārā.
6. Parauga paņemšana: sakrāj siekalas mutes dobumā, piemēram, imitējot košļāšanu vismaz 30 sek. Mēģina atkrēpot siekalas vai krēpas no rīkles gala. Atskrūvē stobriņa vāciņu un neforsēti izspļauj siekalas stobriņā. Ja nepieciešams, to atkārto vairākas reizes, līdz savāc no 2-3 ml siekalu (uz stobriņa atzīme starp "2" un "3"). Cieši aizskrūvē stobriņa vāciņu.
7. Kad paraugs paņemts, ielieciet stobriņu atpakaļsūtīšanas maisiņā un to cieši aizveriet.
8. Nomazgājiet vai nodezinficējiet rokas.
9. Paraugu jānodod, ievietojot to klases kopējā maisā, un klases maisu jāievieto skolas kastē.

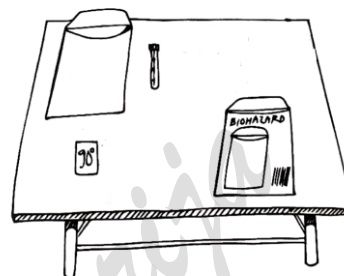

30 min.

